

JAK PRAWIDŁOWO NAŁOŻYĆ I ZDJĄĆ RĘKAWICE

PRZED NAŁOŻENIEM NA DŁONIE RĘKAWIC DOKŁADNIE UMYJ RĘCE
WODĄ Z MYDŁEM PRZEZ MINIMUM 20 SEKUND

ZAKŁADANIE

- 

1 WYJMIJ RĘKAWICE Z OPAKOWANIA
- 

2 UCHYWC JĄ W MIEJSCU, W KTÓRYM POWINIEN ZNAJDOWAĆ SIĘ NADGARSTEK I PŁYNNYM RUCHEM WSUŃ JĄ NA DŁOŃ
- 

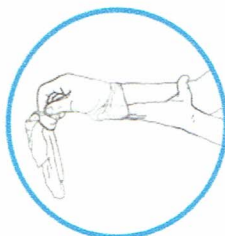
3 NAŁOŻ PIERWSZĄ RĘKAWICĘ
- 

4 DRUGĄ RĘKAWICĘ WYJMIJ GOŁĄ DŁONIĄ
- 

5 ODWIŃ ZEWNĘTRZNĄ POWIERZCHNIĘ NAKŁADANEJ RĘKAWICY ZGIĘTYMI PALCAMI DŁONI W RĘKAWICY I NAŁOŻ NA DRUGĄ RĘKĘ

ZDEJMOWANIE

- 

1 ZŁAP PALCAMI JEDNĄ RĘKAWICĘ NA WYSOKOŚCI NADGARSTKA I ŚCIĄGNIJ JĄ WYWRACAJĄC RĘKAWICĘ WEWNĘTRZNĄ STRONĄ NA WIERZCH
- 

2 TRZYMAJ ZDJĘTĄ RĘKAWICĘ W RĘCE W RĘKAWICZCE I RUCHEM ŚLIZGOWYM WŁOŻ PALCE GOŁEJ RĘKI MIĘDZY RĘKAWICĘ A NADGARSTEK. ZDEJMIJ DRUGĄ RĘKAWICĘ ZDEJMUJĄC JĄ WZDŁUŻ DŁONI, A NASTĘPNIE NACIĄGNIJ NA TRZYMANĄ W PALCACH RĘKAWICĘ
- 

3 WRZUĆ ZDJĘTE RĘKAWICE DO KOSZA

Dla wspólnego bezpieczeństwa

INSTRUKCJE PRZYGOTOWANE ZOSTAŁY ZGODNIE Z WYTYCZNYMI MINISTERSTWA ZDROWIA I GIS



NIE WYRZUCAJ
RĘKAWICZEK
DO TOALETY!



NIE DOTYKAJ
TWARZY
W RĘKAWICZKACH!